

הוראות הפעלה לטלפון CL400



1

מרכז הדגמה ותצוגה – יגאל אלון 155, תל-אביב 67443,
טלפון 03-5710794, 1-700-700-676, פקסי 03-5710680 E-mail: Kilim@Mehalev.com
שוחת צפון – חברת קילים, רח' חלץ 8 (גשר פז- מול מכבי האש) חיפה
טלפון 04-8672622, פקסי 04-8672911

תודה שרכשתם טלפון לכבדי שמיעה GEEMARC CL400 .
הטלפון מיוצר ע"י חברת GEEMARC ומיובא ע"י חברת מהלב.
חברת מהלב הוקמה ביוזמת ארגון הגיוינט וארגון הגג של הנכים
ובסיוע חברת "קילים אלקטרוניקה" במטרה להשיב את כבדי
השמיעה והדיבור אל מעגל החברה שומעת ע"י מתן פתרונות עזר
לשמיעה ודיבור אישיים וציבוריים.

טלפון לכבדי שמיעה GEEMARC CL400 מגביר את השיחה
והצלצל ברמה של 42 דציבלים ומאפשר שליטה על חדות ובהירות
השיחה. הטלפון עוצב בסטנדרטים גבוהים ומחמירים על מנת
לספק הנאה ונוחות לשנים רבות.

אנא קרא את הוראות ההפעלה על מנת להשיג מקסימום יעילות
ונוחות.

לפרטים ומידע נוספים אנא צור קשר:


חברת מהלב
יגאל אלון 155, תל אביב
טל' 03-5710794, פקס' 03-5710680, SMS - 050-5500049
E-mail: kilim@mehalev.com, www.Mehalev.com



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
 מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

פרק 1 - תיאור

1. תיאור כללי

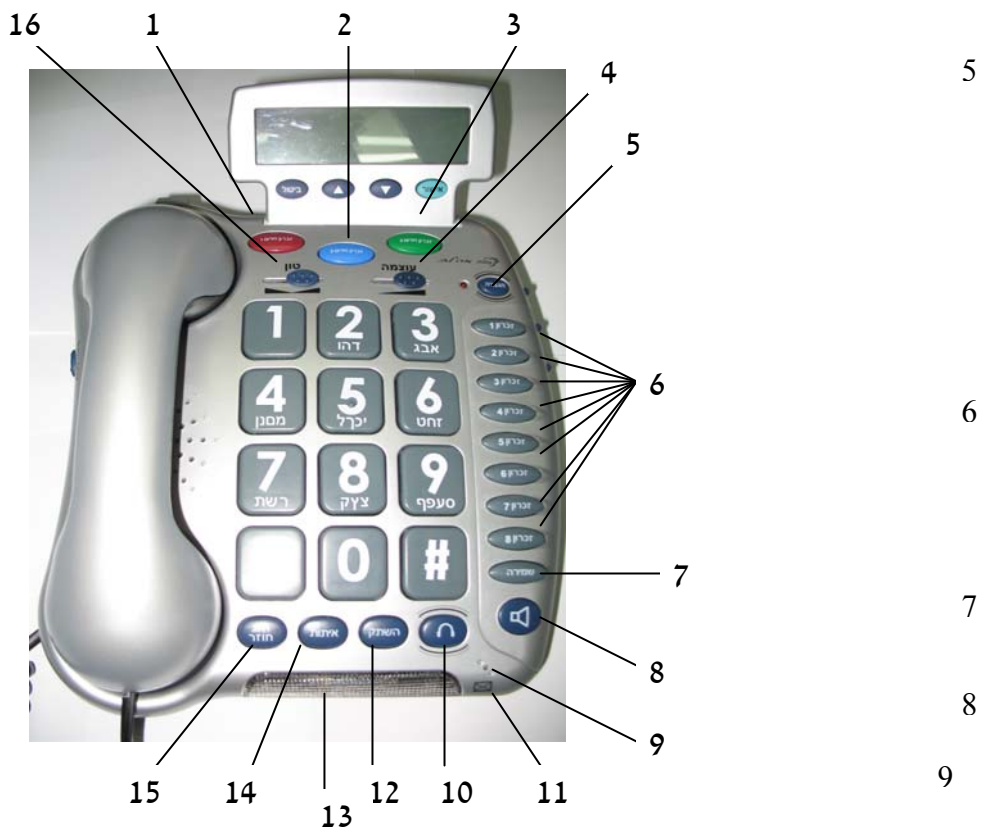

3

מרכז הדגמה ותצוגה – יגאל אלון 155, תל-אביב 67443,
 טלפון 03-5710794, 1-700-700-676, פקסי 03-5710680 E-mail: Kilim@Mehalev.com
 שלוחת צפון – חברת קילים, רח' חלץ 8 (גשר פז- מול מכבי האש) חיפה
 טלפון 04-8672622, פקסי 04-8672911




המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

- (1) זיכרון חירום 1
- (2) זיכרון חירום 2
- (3) זיכרון חירום 3
- (4) עוצמה- מקש הפעלת וכיוון טון השיחה והצלצול
- (5) הגברה- לחצן להפעלת/ביטול מצב הגברת
הטלפון ללקויי שמיעה
- (6) אלפון זיכרונות
- (7) שמירה- מקש זיכרונות
- (8) מקש רמקול
- (9) רמקול
- (10) מקש אוזניות
- (11) הודעה ממתינה/שיחה ממתינה
- (12) תפריט/השתק
- (13) נורת בקרת צלצול
- (14) איתות- מקש שיחה ממתינה
- (15) חיוג חוזר
- (16) טון- מקש לכיוון עוצמת הצלילים



- (17) מקש הגברה (אופציונלי)
- (18) רמקול
- (19) חוט טלפון
- (20) מקש עוצמת רמקול
- (21) מקש הפעלת וכיוון טון השיחה והצלצול (פועל אוטומטית כל פעם שמנתקים את הטלפון)

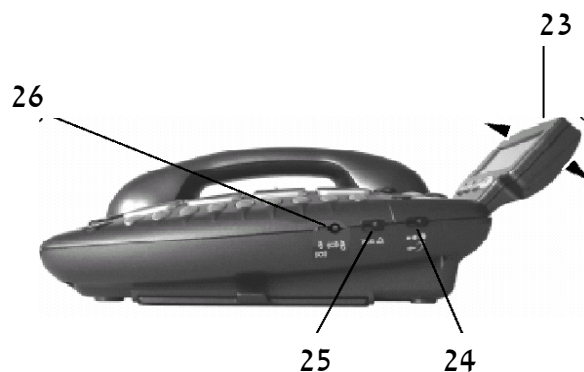


5

- (22) תופסן לתליה על הקיר
- (23) צג הטלפון
- (24) קול יוצא- מקש הפעלת פונקציות הגברת שיחה
- (25) עוצמת צלצול- מקש צלצול חזק/בינוני/סגור
- (26) מקש לבחירת פלאש/כרית רטט/מצב סגור

2. מסך הטלפון

תצוגת המסך כשהשפופרת במקומה (בעריסה).

- (1) סמל שהטלפון פועל
- (2) מקש אישור
- (3) מקשים למעלה ולמטה
- (4) מקש ביטול
- (5) חודש
- (6) יום
- (7) שעות
- (8) דקות

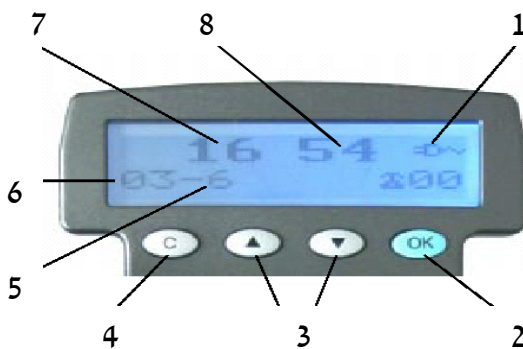






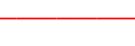


6

- מקש "אישור" משמש לאישור פעולות או אישור על המסך.
- מקשי החיצים למעלה ולמטה ▲ ▼ משמשים למעבר בין אפשרויות התפריט.
- בכלליות מקש "ביטול" משמש לביטול פעולה או לאישור פעולה, לדוגמא: למחוק מספר המאוחסן בזיכרון.

3. תצוגת מסך


ל-CL400 מסך עם סמלים שונים לשימוש בטלפון.

הטלפון פועל באמצעות סוללה + מצב סוללה	
הטלפון פועל באמצעות חיבור לרשת החשמל	
נדרשת אחסנת זיכרונות	
דרגת ניגודיות המסך	
מצב השתק מופעל	
רמקול מופעל	
לחץ על כפתור שיחה מזוהה	
הצג שיחות חדשות שלא נענו	

פרק 2-התקנה

1.חיבור

- 1) מקש הפעלת/כיבוי הצלצול וטון השיחה
- 2) חיבור הספק
- 3) חיבור לקו הטלפון
- 4) חיבור לכרית רוטטת
- 5) חיבור ללולאה השראתית (לופ)
- 6) חיבור למערכת ראש (אוזניות)

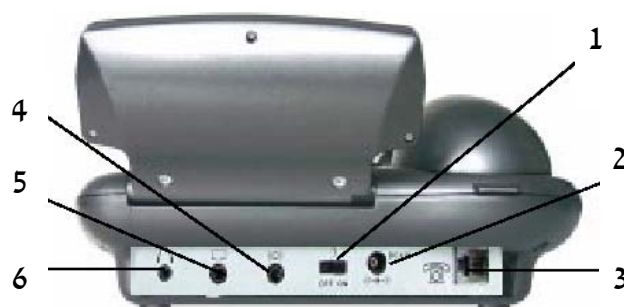

2. התקנה על גבי קיר


- הרם את השפופרת ומשוך את תופסן השפופרת כלפי מעלה, תוך כדי לחיצה על לחצן הניתוק. הפוך את התופסן כך שחלקו הבולט יהיה כלפי מעלה והחזירו למקומו.
- חבר את הבסיס החיבור המצורף אל הקיר בסמוך לקו הטלפון וודא שמחוזק היטב. לאחר מכן הרכב את חלקו האחורי של הטלפון לבסיס החיבור וודא שמחוזק היטב.
- חבר את חוט הטלפון, חוט השפופרת ואת ספק החשמל לטלפון,
- הרם את השפופרת לשמיעת צליל החיוג.



פרק 3-כיוון

1.כיוון צלצול

כפתור הכיוון שנמצא בצד ימין מאפשר לכוון את הצליל לגבוה, נמוך או כבוי.

 : סגור

 : נמוך

 : גבוה

הטלפון מגיע כשהוא מכוון לצליל גבוה ("HIGH"). אם אינך רוצה צלצול מלודי באפשרותך לבחור צלצול חדש ע"י בחירה בין ארבעת המצבים הבאים :
כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"





- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון הטלפון".

- לחץ על כפתור "אישור".

- בחר מצב "כיוון צלצול".
- לחץ על כפתור "אישור".
- בחר את הצלצול המבוקש.
- לחץ על כפתור "אישור".
- ישמע הצלצול החדש.
- לחץ על כפתור "ביטול" 3 פעמים ליציאה.

2. כיוון צלצול ואזעקה

כפתור בעל 3 מצבים נמצא בצד ימין של המכשיר מאפשר את הכיוונים הבאים:

- צלצול והבזקי תאורה: 
- צלצול ורטט: 
- צלצול רטט והבזקי תאורה:  

3. שיטת החיוג

כפתור פולסים/טונים מכוון על מצב "טונים" (T) כפי שמתאימה למרכזיות בארץ.

4. בחירת צורת ההצגה של התאריך והשעה

צורת תאריך:

ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
יום-חודש או חודש-יום.

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)
- לחץ על כפתור "תפריט"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר "תבנית תאריך"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר באפשרות "יום-חודש" או על "חודש-יום"

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.

צורת שעה:

ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
12 שעות או 24 שעות.

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה):
- לחץ על כפתור "תפריט"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר באפשרות "תבנית שעה"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר "12 שעות" או "24 שעות"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.

* במידה ובחרת "12 שעות" וודא שעל צג הטלפון מופיע בשעות לפני הצהריים "AM" ואחר הצהריים "PM".

5. כיוון תאריך ושעה

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה):
- לחץ על כפתור "תפריט"

- בעזרת החיצים למעלה או למטה בחר באפשרות "כיוון שעון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת הספרות המתאימות

- לחץ על כפתור "אישור"

- כוון את הזמן בצורה הבאה: שעות-דקות-חודש-יום

- לחץ על כפתור "ביטול" ליציאה.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה
*הערה: כשתתקבל השיחה הראשונה כל הפרמטרים יתכוונו באופן
אוטומטי אם יש לך שירות של שיחה מזוהה.

6.בחירת שפה

ניתן לבחור בין 16 שפות כולל אנגלית וצרפתית. ע"מ לשנות את
השפה עקוב אחר ההוראות:

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)
- לחץ על כפתור "תפריט"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון
הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר "בחירת שפה"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר שפה, לדוגמא: צרפתית

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

7. כיוון ניגודיות המסך

למסך הטלפון יש אור רקע שנדלק בזמן שימוש בטלפון וככה
אוטומטית לאחר 15 שניות של חוסר פעילות.
עקוב אחר ההוראות ע"מ לכוון את הניגודיות בין האור לדפוס:

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון
הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר "כיוון תצוגה"

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת רמת
הניגודיות

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.

פעולה זו מתבטלת לאחר 8 שניות אם הקו תפוס.

כאשר השפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ "ניתוק אוטומט"

- לחץ על כפתור "אישור"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת ה – "הפעל" להפעלה או "בטל" לביטול של הפונקציה.

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

9. הגדרת גודל מסך

אם ההגדרה האוטומטית של גודל המסך פועלת, המסך יוכל להציג עד 18 ספרות של המספר אותו מחייגים. במידה וההגדרה אינה פועלת יוצגו על המסך רק 8 ספרות.

להפעלת הגדרת המסך האוטומטי:

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת ה – "גודל כיתוב"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר ב "הפעל"

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

10. כיוון מרווחי הזמן בין הצלולים

המכשיר מגיע עם מרווח של 100 M/S כאשר השפופרת במקומה.

- לחץ על כפתור "תפריט"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון תדירות"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר מרווח חדש של 300 או 600 שניות

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

פרק 4-הוראות הפעלה

מכשיר הטלפון CL 400 מאפשר לשוחח במכשיר ללא צורך בהרמת האפרכסת, כך שכל האנשים מסביבך יוכלו גם כן לשמוע את השיחה.


1. מענה לשיחה

בזמן ששיחה נכנסת הטלפון יצלצל ויופיע מספר. במידה ויש לך שרות של שיחה מזוהה יופיע על המסך שם המצלצל.

*אפשרות ראשונה:

- הרם את השפופרת ודבר
- בתום השיחה החזר את השפופרת למקומה כדי לנתק את השיחה.

*אפשרות שנייה:

אפשר לענות לשיחה ללא הרמת השפופרת ממקומה.
- לחץ על כפתור הרמקול  על מנת לשוחח עם המתקשר ללא הרמת השפופרת.

- בתום השיחה לחץ על כפתור הרמקול  כדי לנתק את הקו.

2. ביצוע שיחה

*אפשרות ראשונה:



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

- הרם את השפופרת
- המתן לצליל חיוג וחייג את המספר המבוקש (המספר שחייגת יופיע על צג מסך הטלפון)
- בתום השיחה החזר את השפופרת למקומה כדי לנתק את השיחה.



*אפשרות שנייה (חיוג מוקדם):


חייג את המספר המבוקש ללא הרמת השפופרת. לחצן "ביטול" מאפשר לך למחוק סיפרה שגויה בזמן הקשת המספר.

- בסיום הקשת המספר הרם את השפופרת והמספר יחוייג אוטומטית.
- בתום השיחה החזר את השפופרת למקומה כדי לנתק את השיחה.

*אפשרות שלישית ("HANDS FREE" - בידיים חופשיות):

ישנה אפשרות לנהל שיחה ללא הרמת השפופרת ממקומה בעזרת פונקצית "HANDS FREE" - חייג את המספר המבוקש ללא הרמת השפופרת. לחצן "ביטול" מאפשר לך למחוק סיפרה שגויה בזמן הקשת המספר.

- לחץ על כפתור הרמקול  והמספר יחוייג אוטומטית.
- כאשר יענו לשיחה דברו למיקרופון שנימצא בבסיס המכשיר. ישנה אפשרות לכוון את עוצמת הרמקול ע"י הזזת הכפתור שנמצא בצידו השמאלי של הטלפון.
- בתום השיחה לחץ על כפתור הרמקול  כדי לנתק את הקו.

*הערה: על מנת לבטל את מצב "HANDS FREE" -בידיים חופשיות, במהלך השיחה יש להרים את הטלפון, סימן הרמקול יכבה וסימן טלפון יופיע על המסך. 

על מנת להפעיל מצב של שיחה ב"ידיים חופשיות" במהלך השיחה לחץ והחזק את כפתור הרמקול  לאחר מכן החזר את השפופרת למקומה ושחרר את לחצן הרמקול.

3. שימוש במגבר

במהלך השיחה ישנה אפשרות להפעיל את המגבר שברמקול כדי לכוון את עוצמת הקול.

- לחץ על כפתור הרמקול 

- כוון את עוצמת הקול ע"י הזזת כפתור "עוצמת רמקול" שנימצא בצידו השמאלי של הטלפון


במהלך השיחה ישנה אפשרות להשתמש במצב " HANDS FREE" -ידיים חופשיות

- לחץ והחזק את כפתור הרמקול  עד להחזרת השפופרת למקומה

- שחרר את כפתור הרמקול 

- מצב "HANDS FREE" - ידיים חופשיות פועל כעת.

4. חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג

- הרם את השפופרת או לחץ על כפתור 

- המתן לצליל החיוג ולחץ על הכפתור "חיוג חוזר" הנמצא בשורה התחתונה של המכשיר

- המספר האחרון שחוייג יופעל שוב

- לחץ על כפתור "אישור"

5. חיוג חוזר לאחד משלושים המספרים האחרונים שחוייגו

כאשר השפופרת מונחת במקומה

- לחץ על כפתור "אישור"

על המסך יופיע המספר האחרון שחוייג, סה"כ המספרים שחוייגו, התאריך והשעה שבהם הם חוייגו.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ כדי לנוע בין
המספרים שחוייגו ובחר את המספר המבוקש.

- הרם את השפופרת ולחץ על ציור רמקול 🗣️ המספר יחוייג
באופן אוטומטי.

6. מחיקת מספר אחד משלושים המספרים האחרונים שחוייגו

כאשר השפופרת מונחת במקומה

- לחץ על כפתור "אישור"
על המסך יופיע המספר האחרון שחוייג.

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר
המבוקש.

- לחץ על כפתור "ביטול" ועל המסך תופיע המילה "מחק?"

- לחץ על כפתור "ביטול"

- לחץ על כפתור "אישור" ליציאה.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

7. פונקצית השתקה.

אם תרצה תוכל לשוחח עם מישהו אחר שנמצא בחדר מבלי שהאיש שבטלפון ישמע את הנאמר בחדר ואתה עדיין תוכל לשמוע את הנאמר בטלפון.

- לחץ על כפתור "תפריט"

- על המסך יופיע:  האיש שבטלפון לא יוכל לשמוע אותך או את הנאמר בחדר.

- לחץ על כפתור "השתק" כדי לחדש את השיחה עם האיש שבטלפון.

8. אחסון מספר טלפון בזיכרון – לחצני חיוג מקוצר

ניתן לאחסן בזיכרון הטלפון 8 מספרים + 3 מספרי חירום בלחצני חיוג מקוצר: "זיכרון חירום 1", "זיכרון חירום 2", "זיכרון חירום 3".

על מנת לתכנת מספרים פעל אחר ההוראות:

- הרם את השפופרת

- לחץ על כפתור "שמירה"

- חייג את המספר

- לחץ על כפתור הזיכרון הרצוי "זיכרון 1"/"זיכרון 2" או "זיכרון חירום 1"/"זיכרון חירום 2" וכו'.

- על המסך יופיע "נשמר"

הערה: המספרים ימחקו לאחר כמה שעות אם הטלפון לא ינותק. הכנסת מספר חדש ימחק באופן אוטומטי את המספר הקו.

9. חיוג מספר הנמצא בזיכרון

- הרם את השפופרת, לחץ על כפתור רמקול  והמתן לצליל החיוג

- לחץ על כפתור הזיכרון המבוקש, לדוגמא: "זיכרון 1", "זיכרון 2", "זיכרון חירום 1", "זיכרון חירום 2"


- הכפתור שנילחץ יחייג באופן אוטומטי את המספר שמאוחסן בו.

על מנת לרשום את המספרים שאוחסנו בזיכרונות השתמש בדף הנמצא בתחתית בסיס הטלפון. השתמש בטבלה שבצידו הימני של הטלפון על מנת לרשום את המספר המאוחסן בזיכרון ואת שם בעל המספר.




המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

10. שימוש בשרשרת השראתית

ישנה אפשרות להשתמש בטלפון בעזרת לולאה השראתית באמצעות חיבורה לשקע  שנמצא בצידו האחורי של הטלפון.


ישנן 2 אפשרויות שימוש:

*אפשרות ראשונה:  לחץ על כפתור רמקול על מנת להפעיל את הלולאה ההשראתית והמגבר. דבר לכיוון המיקרופון שנימצא בבסיס הטלפון.

*אפשרות שנייה:
הרם את הטלפון ודבר לשפופרת הטלפון.

*הערה: צריך לחבר את המתאם על מנת להשתמש בלולאת הצוואר. אפשר לכוון גם את רמת השמע.

11. שימוש בפונקצית הרטט

חבר את חוט הכרית הרוטטת לשקע  הנמצא בצידו האחורי של הטלפון. כשתקבל שיחה הרטט יופעל במשך הצלצול.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

*שים לב: אופציית הרטט תופעל רק כשהטלפון יהיה מכוון במצב של "אזהרה ואפשרויות צלצול" (ALARM AND RINGER OPTIONS), כפי שהוסבר קודם.

חשוב: למען ביטחונך חבר רק את הכרית הרוטטת של "GEEMARC SHAKCL_WH", כל דגם אחר עלול להזיק לטלפון שלך.

פרק 5- עוצמת שידור

1. כיוון עוצמת הדיבור

במידה והקול שלך שקט או שלמקבלי השיחות שלך ישנה בעיה לשמוע אותך, באפשרותך להגביר את עוצמת הקול בעזרת הכפתור שנימצא בצידו הימני של הטלפון. ניתן גם להחליש את עוצמת השיחה.

מקסימום נורמלי מינימום





המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

פרק 6- קבלת צליל ועוצמתו


1. כיוון צליל ועוצמתו בשיחה נכנסת

ניתן להגביר את הקול ולכוון את הצליל בהתאם לשמיעה שלך.
כפתור "הגברה" מאפשר פונקציות נוספות לקבלה ותפקודי צליל
במהלך השיחה.
כשהפונקציה פועלת יידלק אור אדום ל"אקסטרה הגברה"
ותפקודי הצליל שנמצא ליד כפתור "הגברה".

*שים לב: כאשר פונקצית כיוון הצליל אינה פועלת ניתן לכוון רק
את עוצמת השיחה הנכנסת מ 0-15 דציבלים.
כאשר פונקצית כיוון הצליל והקול פועלת ניתן לכוון את עוצמת
השיחה הנכנסת מ 15-30 דציבלים.
בשני המקרים ניתן להגביר את עוצמת קול השיחה הנכנסת בעזרת
הכפתור שנמצא על שפופרת הטלפון
ב- 12 דציבלים.
השתמש בכפתורי הטון "טון" והצלצול "עוצמה" כדי להתאים את
השיחה לפי השמיעה שלך:



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

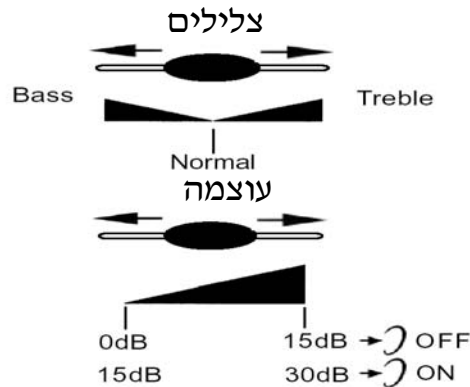

*הערה: כשהכפתור "הגברה" מאחורי הטלפון פועל ("ON") פונקציות "אקסטרה הגברה" ותפקודי הצליל יופעלו באופן אוטומטי.
במידה שהכפתור "הגברה" סגור ("OFF") יש ללחוץ על כפתור "הגברה" על מנת להפעילו.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

פרק 7-ספר טלפונים

1. יצירת ספר טלפונים

באפשרותך לאחסן 99 מספרי טלפון עם השמות.
כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "ספר
טלפונים"

- לחץ על כפתור "אישור"

- בחר "הוסף"

- לחץ על כפתור "אישור"

- הכנס את מספר הטלפון המבוקש (עד 30 ספרות)

- לחץ על כפתור "ביטול" על מנת למחוק טעות/סיפורה שגויה
שהוקשה

- כשסיימת להכניס את המספר לחץ על כפתור "אישור" וכעת
הכנס את שם בעל המספר על ידי לחיצה על האותיות. באפשרותך

- כדי להוסיף רווח לחץ על כפתור "אישור" פעמיים
- אם האות הבאה זהה לאות הקודמת או נמצאת על אותו כפתור בטלפון, לחץ על כפתור "אישור" כדי להמשיך בכתובה.
- לחץ על כפתור "ביטול" על מנת למחוק טעות/סיפורה שגויה שהוקשה.
- כשסיימת להכניס את מספר הטלפון והשם לחץ על כפתור "אישור" למשך 3 שניות כדי לאשר את הרישום.
- כעת באפשרותך לאחסן את המספר הבא.
- לחץ על כפתור "ביטול" ליציאה.



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

מקש	אפיונים	מקש	אפיונים
1	1 . . ? - ' <	6	6 ח ט
2	2 ה ו	7	7 ש ת
3	3 א ב ג	8	8 ז ק
4	4 מ נ ו	9	9 ע פ ה
5	5 י כ ד ל	0	0 % \$ / @ & +

2. אחסנת מספר טלפון מרשימת שיחות הנכנסות

במידה ויש לך פונקציה של שיחה מזוהה באפשרותך לאחסן שיחה נכנסת בספר הטלפונים.

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- שיחות נכנסות תוצגנה על מסך הטלפון

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר שברצונך לאחסן מהרשימה

- לחץ על כפתור "אישור" והחזק עד שהספרה האחרונה תהבהב

- לחץ על כפתור "אישור"

- כעת באפשרותך להוסיף גם את שם בעל מספר הטלפון שניבחר. בסיום לחץ על כפתור "אישור" למשך 3 שניות כדי לאשר את הרישום

- לחץ על כפתור "ביטול" ליציאה.

3. מחיקת מספר טלפון מספר הטלפונים

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "ספר טלפונים" ולאחר מכן על "דפדף"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר שברצונך למחוק מהרשימה

- לחץ על כפתור "ביטול" ועל המסך תופיע המילה "למחוק?"

- לחץ על כפתור "ביטול"



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

- לחץ על כפתור "אישור" ליציאה.

4. שינוי מספר טלפון בספר הטלפונים

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "ספר
טלפונים" ולאחר מכן על "דפדף".

- לחץ על כפתור "אישור"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר
הרצוי

- לחץ על כפתור "אישור" והחזק עד שהספרה האחרונה במספר
הטלפון תהבהב

- לחץ על כפתור "ביטול" והכנס את המספר החדש

- לחץ על כפתור "אישור"

- כעת באפשרותך לשנות את השם



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

- לחץ על כפתור "ביטול" כדי למחוק אות

- לחץ על כפתור "אישור" למשך 3 שניות כדי לאשר את הרישום

- לחץ על כפתור "ביטול" ליציאה.

5. התקשרות באמצעות מספר משיחה נכנסת שבספר הטלפונים


כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "ספר טלפונים" ולאחר מכן על "דפדף"

- לחץ על כפתור "אישור"

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר הרצוי. ניתן לאתר מהר את הרשומה על ידי הקשת האות הראשונה של השם

- הרם את השפופרת או לחץ על כפתור רמקול 

- המספר יחוייג באופן אוטומטי




המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

הערה: ניתן לצפות ברשימת השיחות הנכנסות במהלך השיחה על ידי לחיצה על כפתור "אישור" ואחר כך לנוע בין המספרים בעזרת החיצים למעלה ולמטה.

פרק 8- שרות שיחה מזוהה

1. שימוש ברשימת השיחות הנכנסות


בהתייחס לשיחה מזוהה, רשימת השיחות מאפשרת לך לאחסן את השיחות הנכנסות. כאשר הזיכרון של רשימת השיחות מלא אז שיחה חדשה תופסת את מקומה של השיחה הישנה ביותר. כל שיחה מאוחסנת כרשומה עם תאריך ושעת השיחה. לדוגמא:

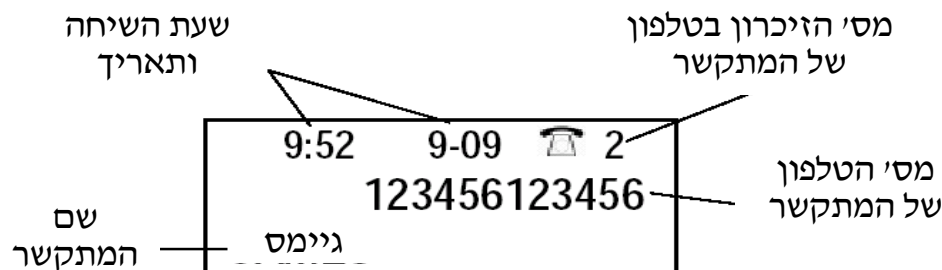

במידה והמצלצל אינו מעוניין בזיהוי שלו על מסך הטלפון יוצג כך:

9:52	9-09		3
פרטי			

במידה והמספר אינו מוכר או ממרכזיה על מסך הטלפון יוצג כך :

9:52	9-09		3
מחוץ לאזור			

במידה ואותו מצלצל מתקשר כמה פעמים אז רק הצלצול האחרון יאוחרסן ברשימת השיחות ועל המסך יופיע + :

9:52	9-09	N 2+
654321654321		
הלן		

שים לב : במהלך צפייה ברשימת השיחות, יציג המסך את האות "N" לשיחה חדשה שטרם נצפתה.
כששיחה או שיחות חדשות מתקבלות נורית השיחות החדשות תתחיל להבהב ועל המסך יוצג כך :



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה

דוגמה זו מציגה את סה"כ השיחות הנכנסות 28 ושיחה חדשה 1

9:52	9-09
01 מס' חדש	28 סה"כ

כדי לצפות בשיחה החדשה השתמש בחיצים למעלה ולמטה .
כאשר כל השיחות החדשות נצפו נורית השיחות החדשות תכבה
והמסך יחזור להציג את רשימת השיחות הנכנסות :

16 : 53	
28	16-6

כאשר רשימת השיחות הנכנסות ריקה מסך הטלפון יוצג כך :

12 : 55	
00	18-6



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה


2. חיוג חוזר מרשימת השיחות המזוהות

ישנן שתי אפשרויות:

*אפשרות ראשונה:

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר המבוקש

- הרם את השפופרת או לחץ על כפתור רמקול 

- המספר יחוייג באופן אוטומטי

*אפשרות שנייה:

- הרם את השפופרת

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר המבוקש

- לחץ על כפתור "אישור"

- המספר יחוייג באופן אוטומטי

*שים לב: הפונקציה לחיוג חוזר אינה אפשרית כשהשיחה אינה מזוהה.

3. מחיקת מספר מרשימת השיחות המזוהות

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת המספר שברצונך למחוק מהרשימה

- לחץ על כפתור "ביטול" והחזק עד שעל המסך תופיע המילה "מחק?"

- לחץ על כפתור "ביטול" לאישור

- לחץ על כפתור "אישור" ליציאה.

4. מחיקת כל המספרים מרשימת השיחות המזוהות

כשהשפופרת מונחת במקומה (בעריסה)

- השתמש בחיצים למעלה ▲ או למטה ▼

- לחץ על כפתור "ביטול" והחזק עד שעל המסך תופיע המילה

- לחץ על כפתור "ביטול" לאישור.

5. שיחה ממתינה

פונקצית השיחה הממתינה מאפשרת לך לענות לשיחה חדשה שנכנסת בזמן שאתה נמצא כבר בשיחה, ולתמרן ביניהן. כל זאת במידה שאתה מנוי לשירות זה.
פונקצית השיחה הממתינה אינה פועלת (OFF). כדי להפעילה עקוב אחר ההוראות:
כשהשפופרת במקומה (בעריסה)

- לחץ על כפתור "תפריט"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "כיוון הטלפון"

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "שיחה ממתינה"

- לחץ על כפתור "אישור"



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה
- לחץ על החיצים למעלה ▲ או למטה ▼ לבחירת "הפעל"

- לחץ על כפתור "אישור"

- לחץ על כפתור "ביטול" פעמיים ליציאה.

- כשאתה נמצא בשיחה עם מצלצל מס' 1 השיחה המזוהה תוצג על מסך הטלפון כך:

9:52	9-09	1
123456123456		
מתקשר מס' 1		

צפצוף ישמע כאשר שיחה נוספת תתקבל והיא תוצג על מסך הטלפון כך:


9:52	9-09	1
654321654321		
מתקשר מס' 2		



המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים" אלקטרוניקה
שים לב: במידה והשיחה הממתינה לא נענתה היא תרשם ברשימת
השיחות הנכנסות, כך שתוכל להתקשר אליה שוב מאוחר יותר.

6. הודעה ממתינה

מערכת זו מאפשרת למתקשר להשאיר הודעה.
אתה תקבל הודעה על השיחה הנכנסת על ידי רשימת השיחות
הנכנסות. השיחה תזוהה משאר השיחות על ידי "הודעה ממתינה"
ונורית ההודעות הנכנסות תהבהב.

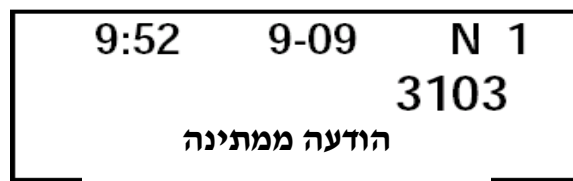

*שים לב: ההודעה "הודעה ממתינה" תוצג על מסך הטלפון כל עוד
שהיא לא נקראה. לאחר שנקראה היא תעלם מהמסך.

לפרטים ומידע נוסף אנא צור קשר:

חברת מהלב
יגאל אלון 155, תל אביב
טל' 03-5710794, פקס' 03-5710680, SMS - 050-5500049
E-mail: kilim@mehalev.com, www.Mehalev.com